



Installation du Capteur Promantix

Assurez-vous que CADI 8.25.x.x est installé et prêt à utiliser. Trouvez le fichier “promantix_installationPack_vx.x.exe” et double-cliquez-le.
(Grandeur des images a été modifiée pour raison d'espace.)

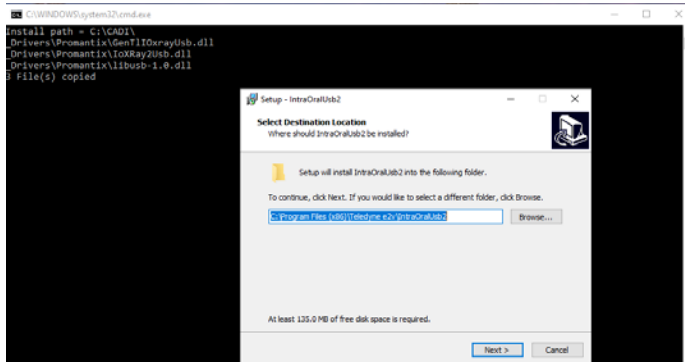


Ceci est la première fenêtre que vous verrez. (La fenêtre noire dans le fond sera présente, n’y toucher pas.)

Cliquez sur “Next >”

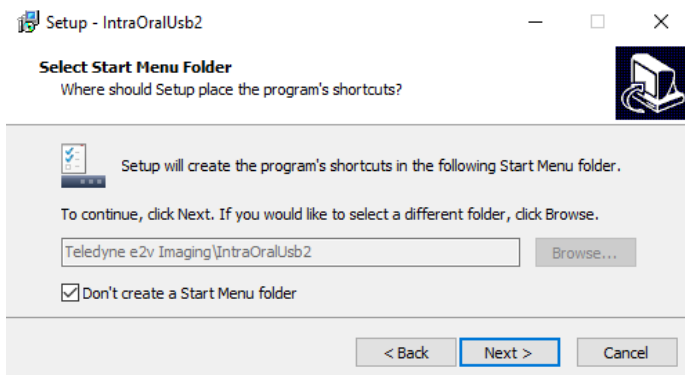


Sur cette fenêtre, cochez le choix “**Don't create a Start Menu folder**”.

Cliquez sur “Next >”

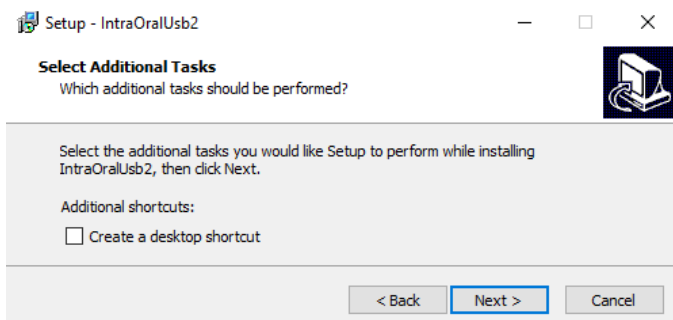


Sur cette fenêtre, **NE PAS** cocher le choix “**Create a desktop shortcut**”, ceci n'est pas nécessaire.

Cliquez sur “Next >”.

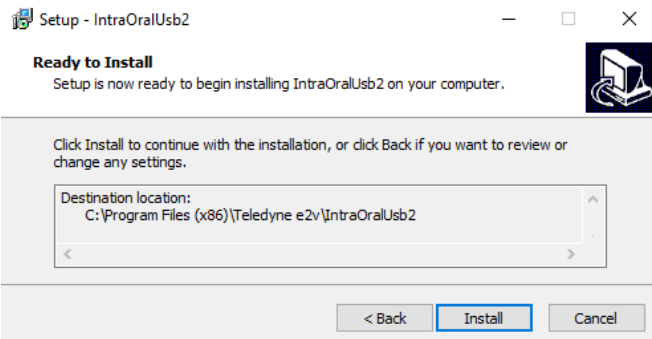


Ceci est la fenêtre de confirmation.

Cliquez simplement sur “**Install**”.

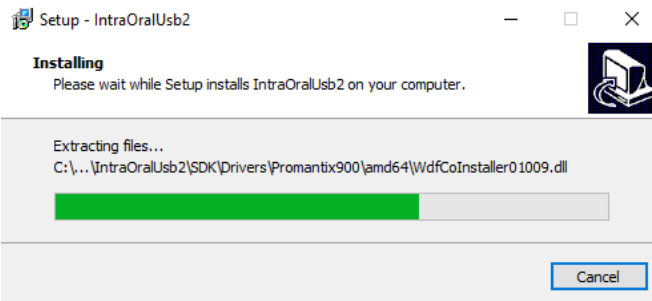


L’installation commencera; attendez et ne faites rien.

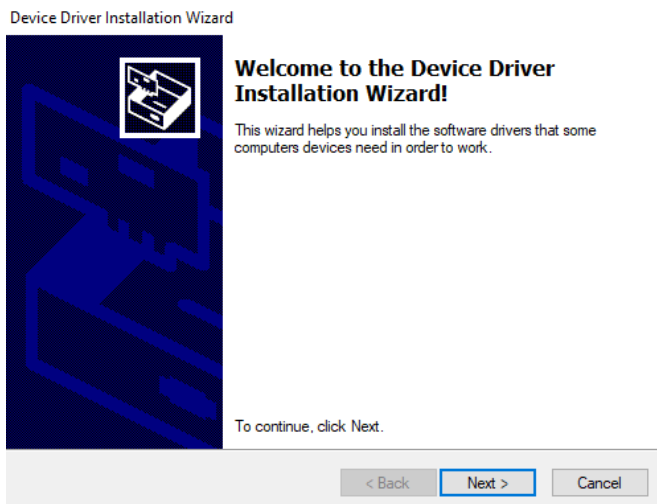


Lorsque vous verrez cette fenêtre, cette partie de l’installation sera terminé.

Cliquez sur “**N**ext >”

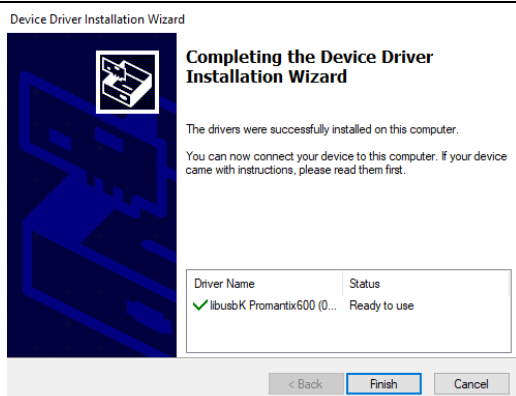

Sur cette fenêtre, cliquez simplement sur le bouton “**F**inish”.


Device Driver Installation Wizard

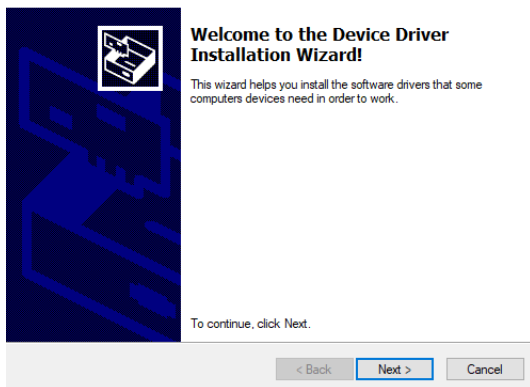

Une nouvelle fenêtre d'installation apparaîtra.

Cliquez sur “**Next >**”.


Device Driver Installation Wizard

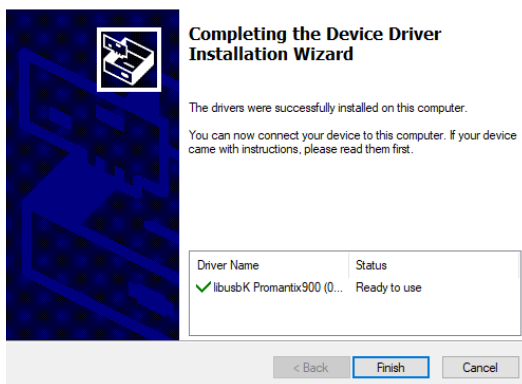

Cette seconde partie sera très rapide. Vous verrez cette fenêtre apparaître en quelques secondes, c'est normal.


Cliquez sur “**Finish**”.

Setup - IntraOralUsb2

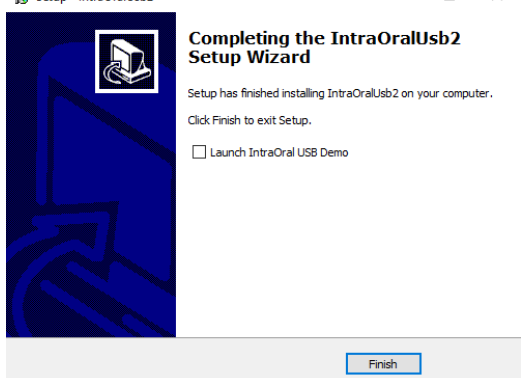

ENLEVEZ le crochet du choix “**Launch IntraOral USB Demo**”.

Cliquez sur “**Finish**”

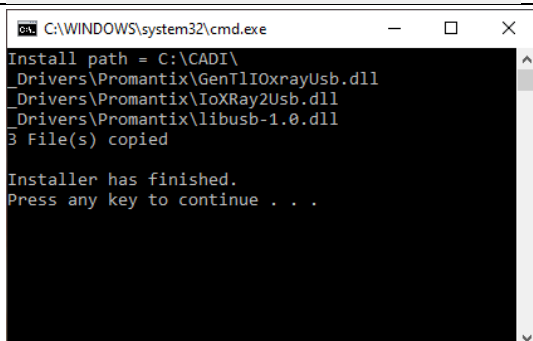

Une fenêtre apparaîtra. Dans cette fenêtre, faites ce qui est indiqué; “**Press any key to continue...**” (Appuyez sur n’importe quelle touche pour continuer.)

L’installation des pilotes est maintenant terminée.

Maintenant **REDÉMARREZ LE PC**

Configuration de PROMANTIX dans CADI



- Dans CADI, dans les menus déroulants, cliquez **“Options”** et **“Configuration”**
- Dans les modules sur la gauche, cliquez **“X-Ray MDX”**
- Cliquez l'onglet **“EV71 (CMOS)”**
- Le **“Timeout (s)”** devrait être déjà sur 120s.
- **“Filter script”**: devrait être **“2”** déjà.
- L'option **“Auto Select Sensor”** devrait être cochée.
- Cliquez sur **“Sauvegarder”** et **“Sortie”**
- Vous êtes prêt à utiliser le capteur Promantix dans CADI.



Ceci se trouve au bas de l'écran d'acquisition; c'est la barre d'exposition. Remarquez l'échelle de bleu à rouge.



Le milieu indique bonne exposition. Vers le BLEU indique SOUS exposé, vers le ROUGE indique SUR exposé.

Pour assistance ou information appelez le support CADI.