


Optiview 2 Installation de la Caméra

Assurez-vous que CADI est installé et prêt à utiliser.
(La grandeur des images a été modifié pour raison d'espace.)

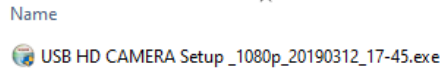


Name
USB HD CAMERA Setup_1080p_20190312_17-45.exe


Localisez le fichier "**USB HD CAMERA Setup_1080p_20190312_17-45.exe**".
Double-cliquez le fichier.




Sur cette fenêtre, cliquez sur "**Next**".
L'installation commencera, attendez.

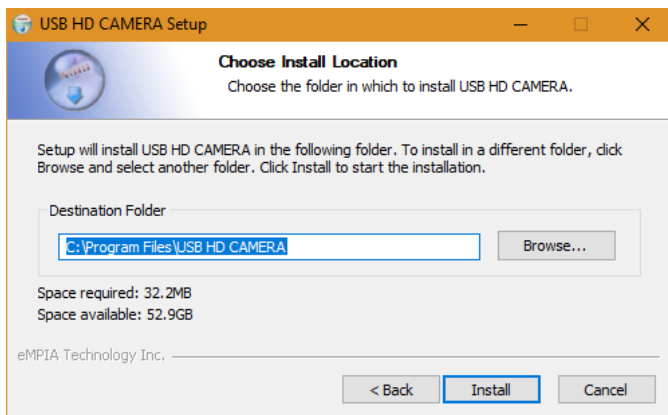


Sur cette fenêtre, cliquez sur "**Install**".

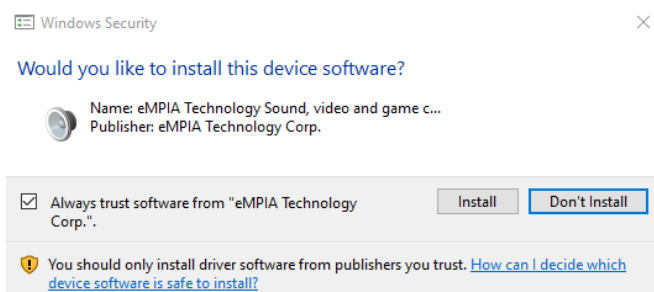


Lorsque cette fenêtre apparait, cliquez sur "**Install**".

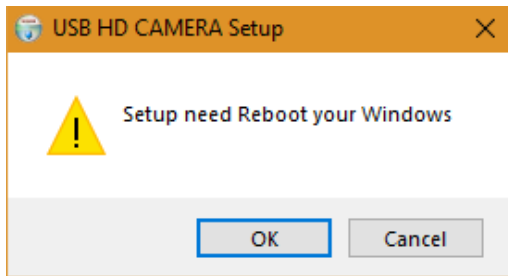

L'installation doit redémarrer Windows. Cliquez sur "**OK**" et l'ordinateur redémarrera.

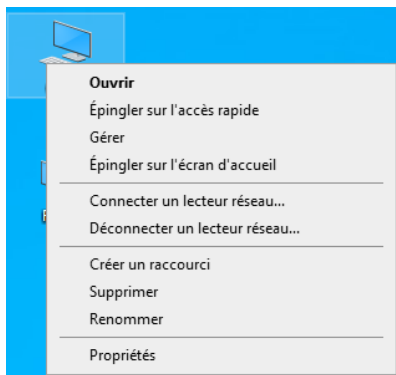

Une fois Windows redémarré, cliquez sur l'icône "**Ce PC**" et cliquez sur "**Gérer**".

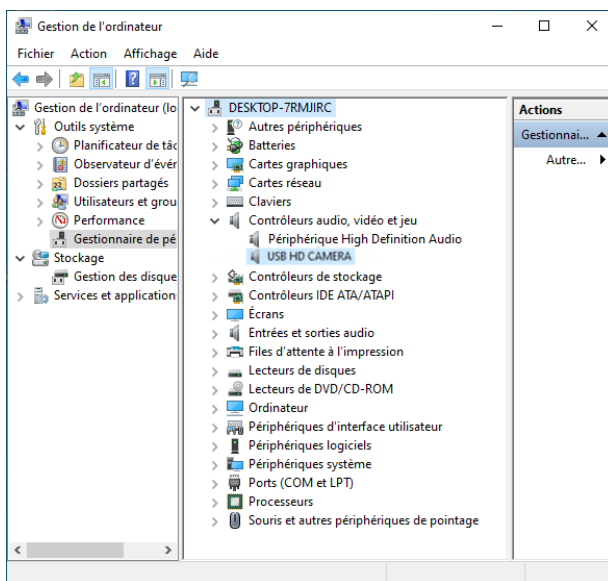

Sur la gauche, cliquez sur "**Gestionnaire de Périphériques**".

Dans l'écran centrale, cliquez le signe plus (+) de "**Contrôleurs audio, vidéo et jeu**".

Si l'installation a fonctionné vous verrez "**USB HD CAMERA**" dans la liste.

Vous pouvez maintenant fermer cette fenêtre.


Vous pouvez maintenant ouvrir CADI pour configurer la caméra intraorale.

(Caméra DOIT être CONNECTÉ PAR CÂBLE pour changer les fonctions des boutons.)

(Par défaut, les boutons de côté capture et celui du dessus déplace vers la prochaine case.)

Les deux boutons de côté partage la même fonction.)

Dans CADI, cliquez "**Options**", "**Configuration**" et cliquez le module "**WDMStillCap**".

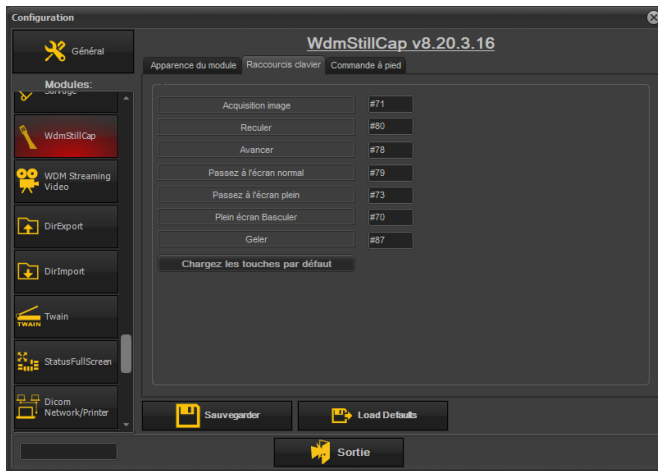


Cliquez l'onglet "**Raccourcis clavier**" et choisissez l'action que vous désirez pour les boutons. Dans l'exemple, "**Acquisition image**" est affecté au bouton du dessus et ceux de côté pour le déplacement.

Le bouton sur la caméra qui ressemble à une cible est pour focus automatique.

Cliquez "**Sauvegarder**" et "**Sortie**".



Accédez au module intraoral de CADI en cliquant l'icône.

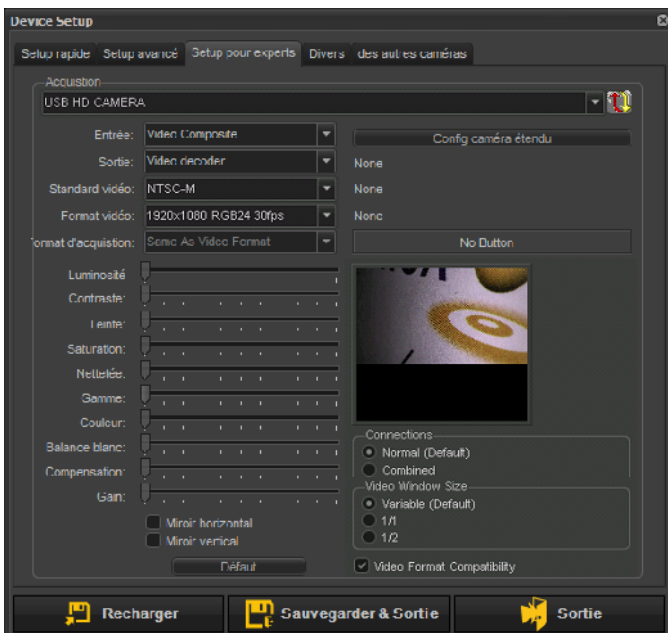

Lorsque vous arrivez dans le module intraoral vous verrez la fenêtre de configuration.

Cliquez l'onglet "**Setup pour experts**".

Dans "**Format vidéo**:" choisissez "**1920x1080 RGB24 30fps**" (Vous pouvez aussi choisir RGB32).

"**Connections**" doit être "**Normal**"

"**Video Format Compatibility**" doit être coché.

Cliquez "**Sauvegarder & Sortie**".

Vous pouvez maintenant utiliser la caméra dans CADI et faire des captures.


Installation du Système Sans-fil Optiview 2



Connectez l'adaptateur à la station d'accueil.
(Chargez la batterie avant utilisation.)



Connectez la "**Liaison USB Sans-fil**" au câble USB.

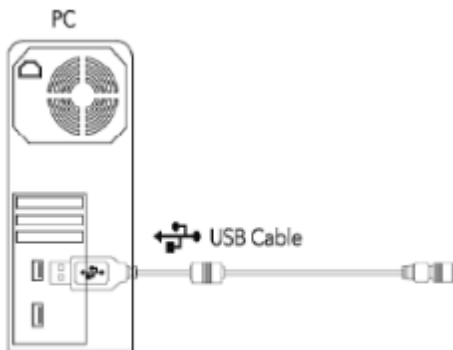


Connectez le "**Cable USB**" avec la "**Liaison USB Sans-fil**" à un port USB de l'ordinateur.


NOTE: Placez la liaison USB sans-fil horizontalement avec la batterie pour une meilleure communication entre les appareils.

Installation du "**UWB Connection Manager**"


Name

 Wireless_manager_1_0_5_0_USA.exe

Double-cliquez le fichier "**wireless_manager_1_0_5_0 USA.exe**".

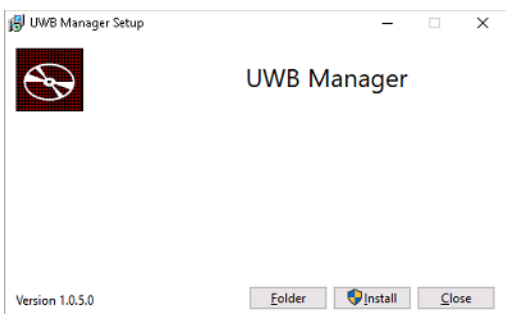


Sur cette fenêtre, cliquez "**Install**".

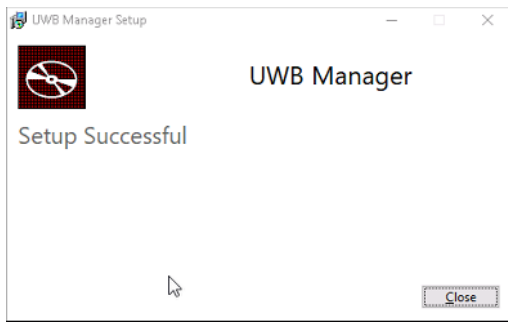

Sur cette fenêtre, cliquez "**Close**".




L'installation a bien fonctionné si vous pouvez voir cette icône sur votre bureau.

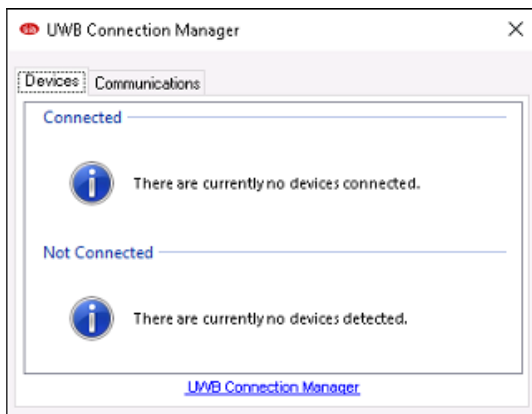


Double-cliquez l'icône "**UWB Connection Manager**".

Dans le moment, il n'y a rien dans la liste.

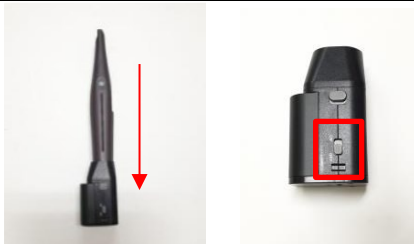

Connectez la batterie sur la caméra intraorale **en premier**.


Mettre la caméra à "**ON**".

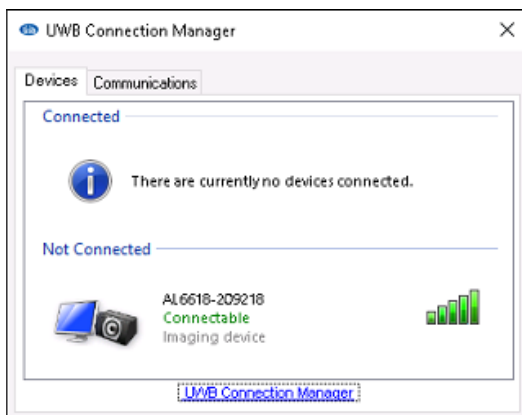

Sur l'onglet "**Devices**" vous devriez voir la caméra apparaitre.




Cliquez sur le bouton **"Connect"** qui apparait lorsque vous mettez la souris au-dessus des lignes vertes du sans-fil.

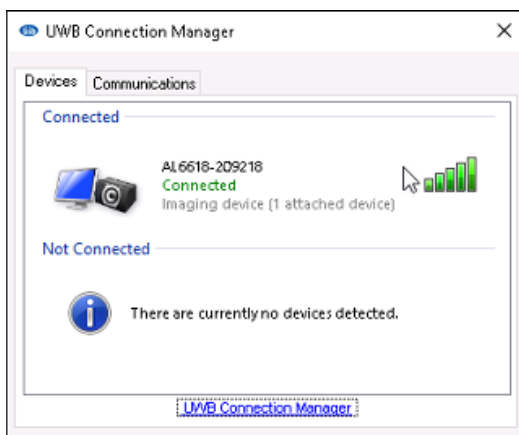


(Vous devez attendre que l'ordinateur et l'unité sans-fil communiquent ensemble avant de voir la caméra dans la liste, soyez patient.)


Si la caméra se connecte avec succès, vous la verrez dans la section **"Connected"** de la fenêtre de UWB Connection Manager.

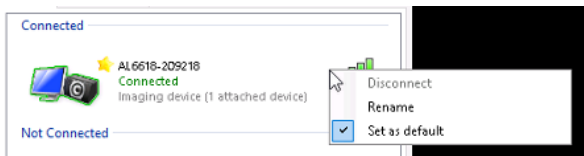

Cliquez le bouton droit de la souris sur les barres vertes du sans-fil et choisissez **"Set as default"** afin d'activer la caméra par défaut.

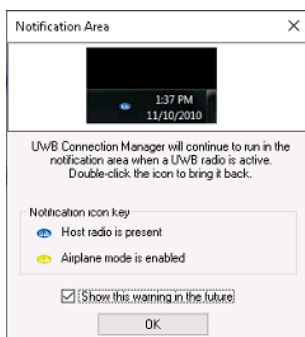

Vous pouvez maintenant fermer l'application en utilisant le **"X"** dans le coin supérieur droit. Une fenêtre s'ouvrira, cliquez le bouton **"OK"**.

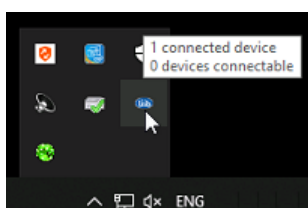

Dans le coin inférieur droit de Windows, sur la barre des tâches, vous pouvez voir l'icône de la caméra sans-fil.

NOTES IMPORTANTES

1. La distance maximale d'opération entre la caméra et l'ordinateur est de 5m.
2. Le chargement avec l'adaptateur de charge prend 2 heures 30 minutes. Charge complète après drainage complet de la batterie est environ de 4 heures.
3. Après l'utilisation de la batterie, la remettre sur la station d'accueil afin de recharger la batterie. Si vous n'utilisez pas la batterie pour une longue période, mettez le sans-fil à OFF et laissez la batterie se charger.
4. Le temps d'utilisation sans interruption: Optiview 2 – min. 40 ~ max. 1 heure.
5. Ne pas couvrir avec les mains le côté frontal du sans-fil. Ceci causera des perturbations du signal.

NOTES DE PRÉCAUTION POUR LE SYSTÈME SANS-FIL

Chargement de la Batterie. Le temps de chargement de la batterie après une décharge complète prend beaucoup de temps. L'unité sans-fil devrait être placé sur la station d'accueil après CHAQUE utilisation afin de recharger la batterie.

Si la batterie est complètement déchargée avant chaque recharge, sa durée de vie en sera diminuée.

POSITIONNEMENT. Une position horizontale entre le receveur USB et l'unité sans-fil est recommandé pour un meilleur transfert de signal. Par exemple, il n'est PAS recommandé que le receveur USB soit au niveau du plancher et que l'unité sans-fil soit sur une table, ceci crée une position VERTICALE. Positionner le receveur USB et l'unité sans-fil à une hauteur similaire (horizontalement) vous assurera un meilleur signal.

Pour assistance ou information appelez le support CADI.