

# Guide de Maintenance pour Caméra Optiview 2

## 1.0 Condition d'utilisation / environnement de stockage

- Température 0°C à +40°C
- Humidité: 30% HR à 85% HR
- Pression atmosphérique: 800 kPa à 1,060 kPa



## 1.1 Sécurité du système

- Lorsque la caméra est placée dans le support équipé d'aimants, le pouvoir est interrompu en fermant la REED SWITCH de la caméra.

## 1.2 Nettoyage

- Avant de nettoyer l'équipement, déconnectez le câble de l'ordinateur.
- Lorsque vous nettoyez la caméra, humectez un chiffon non pelucheux avec de l'alcool isopropylique (70%) et essuyez pour désinfecter.



- Lors du nettoyage avec de l'alcool, le chiffon non pelucheux doit être humide et non mouillé pour permettre au liquide de s'infiltrer dans les crevasses.
- Nous avons eu des cas où l'utilisateur a autoclavé ou stérilisé la caméra à basse température ou au plasma. Cela annule la garantie, tout comme la chute de la caméra / et / ou un impact physique sur la caméra annule la garantie car toutes ces choses peuvent altérer, desserrer ou endommager la partie interne.

Pour assistance ou information appelez votre support CADI.