

## Guide de Départ pour Caméra Optiview 2



**1** - Ceci est le bouton de CAPTURE; pour capturer des images.

**2** - Ceci est le bouton de FOCUS; vous pouvez utiliser ce bouton pour changer entre le mode AUTO et SEMI en maintenant le bouton.

**3-4** - Les boutons de côté sont pour se déplacer.


Lorsque vous maintenez le bouton FOCUS (**2**), le mode changera de "**Auto**" à "**Semi**", la lumière indiquera le mode actif.

Dans le mode "**Semi**", le bouton FOCUS peut être utilisé pour faire le point.



Ceci est le support de caméra. Quand vous placez la caméra dans le support, la lumière s'éteint. Lorsque vous prenez la caméra du support, la lumière s'allume automatiquement.

Sur la caméra sans-fil, les boutons sont exactement les mêmes. Référez-vous à la section du haut pour la description des boutons.

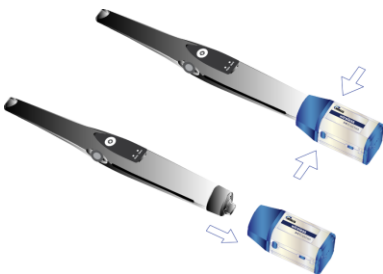

Pour enlever l'unité sans-fil, appuyez les boutons de chaque côté de l'unité et tirer vers le bas pour le détacher de la caméra. Soyez prudent et délicat afin de préserver votre unité sans-fil en bonne condition.

Après chaque utilisation, placez la caméra avec l'unité sans-fil sur le socle de recharge afin que la caméra se recharge.

Si vous savez que vous n'utiliserez pas la caméra pour une longue période, vous pouvez fermer l'unité sans-fil et la laisser sur le socle pour qu'elle recharge.

Pour assistance ou information appelez votre support CADI.